

moisteane IV 専用


*skin
mask*

取扱説明書

1

標準セット内容と各部名称


1 スキンマスク

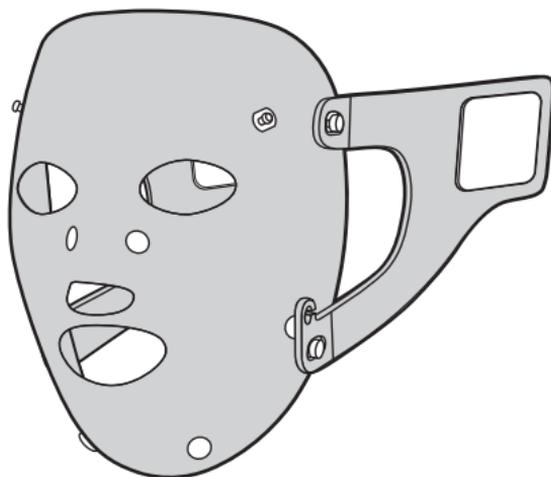

2 リスト電極





3 スキンマスク用コード

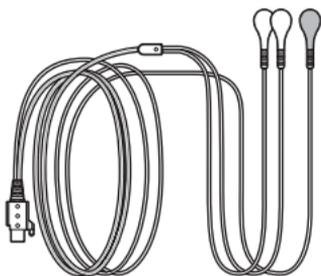

4 電極保護シート



5 収納ポーチ

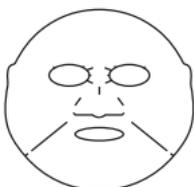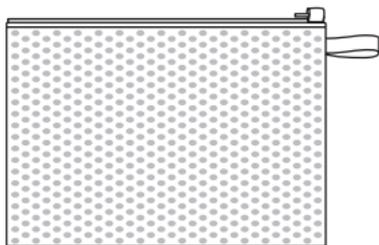


モイスティーマ イオンシート (別売り)

モイスティーマ スキンマスク専用のシート状マスクです。効率の良い通電を可能にします。



※商品改良のため、予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

2


ご使用手順

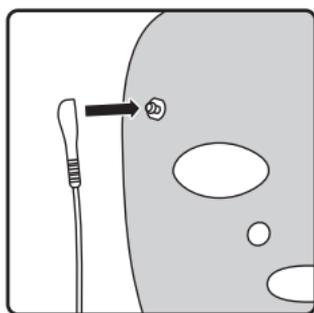

- ①スキンマスクとリスト電極にスキンマスク用コードのフックを接続します。

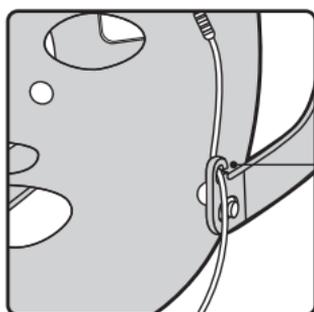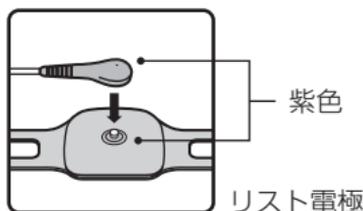


- ②スキンマスク用コードの動きが気になるようでしたら、バンドのコード留めに入れてください。

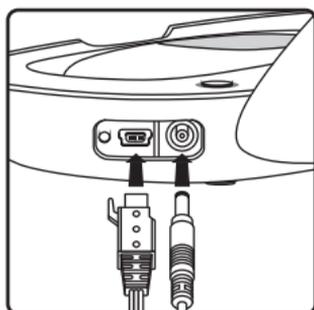


- ③スキンコンディショナーにACアダプターとスキンマスク用コードを接続します。



- ④化粧水または美容液をお顔に塗布し、右ページの「スキンマスクの付け方」を参照しながらイオンシート、スキンマスクの順にセットします。
※イオンシートの取扱方法は、イオンシート箱裏の〈ご使用方法〉を参照してください。

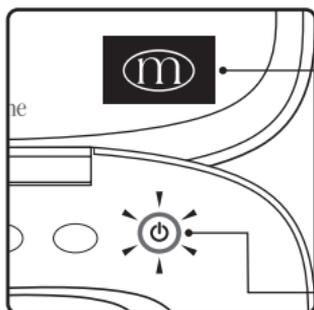

- ⑤フタを開け、電源スイッチを押して電源を入れます。ディスプレイに起動ロゴが表示された後、スキンマスク用の初期設定画面が表示されます。

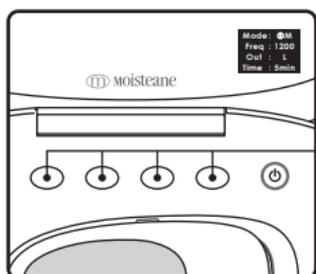

- ⑥タッチスイッチを押してスキンコンディショナーのお手入れ内容を設定します。
 (③スキンコンディショナー表示 参照)

→ タッチスイッチ


⚠ 注意




OUTPUT HIGH:[H]は、使用しないでください。肌質によって炎症を起こす恐れがあります。

スキンマスクの付け方

- (1) イオンシートを顔にのせた後、スキンマスクを顔につけます。

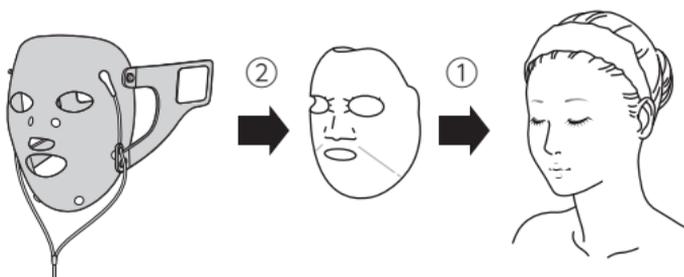


- (2) スキンマスクがフェイスラインに沿うように、バンドを斜め上方向に軽く引き上げて、頭の後ろで留めます。

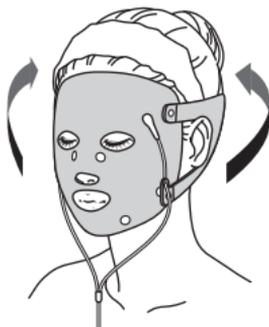

※バンド部分を留める時、面ファスナー部分は交差するように留めてください。水平に留めるとマスクが不安定になります。

強く締め過ぎないように注意してください。肌ストレスの原因となります。

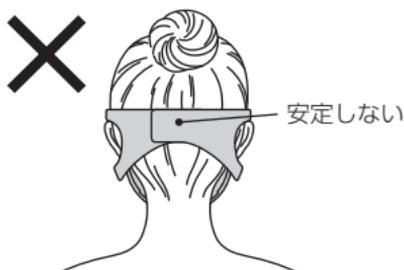




⑦リスト電極を手首に装着します。

[リスト電極の装着法]

手首外側を湿らせてから電極部を置き、
バンドを巻いて、面ファスナーにて固定し
ます。

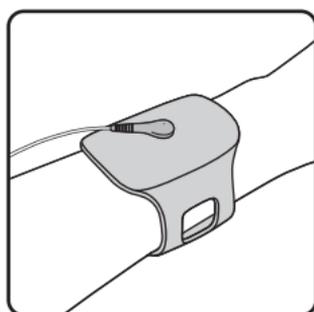


⑧電極が肌に触れると通電が開始され、ディスプレイに通電中の画面が表示されます。



⑨通電中は電源ランプがゆっくり点滅し、タイマーがカウントアップします。




1分経過毎に音でお知らせします。
1分経過：1回、2分経過：2回
3分経過：3回、4分経過：4回
5分経過：5回

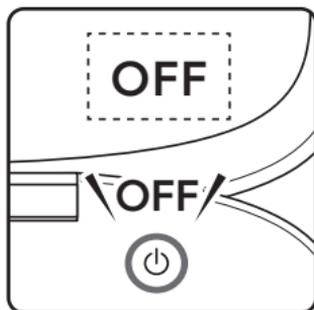

⑩通電時間が設定時間を経過すると自動的に電源が切れます。

⑪お手入れ終了後は、イオンシートとスキンマスク及びリスト電極をはずします。

※スキンマスクをはずす際は、バンドの留め具部分に無理な力をかけないように注意してください。(別紙「使用上の注意」参照)

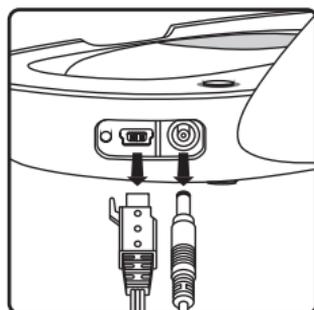

⑫フタを閉じ、スキンコンディショナーからACアダプター、スキンマスク用コードを抜きます。

※スキンマスクとリスト電極はスキンマスク用コードをはずした後、清潔に保管してください。

(5 使用後のお手入れと保管要領 参照)

3 スキンコンディショナー表示


ディスプレイ

タイマー表示：実通電時間が表示されます。



タッチスイッチ表記とディスプレイ表示 ※【】内はディスプレイ表示

タッチスイッチ

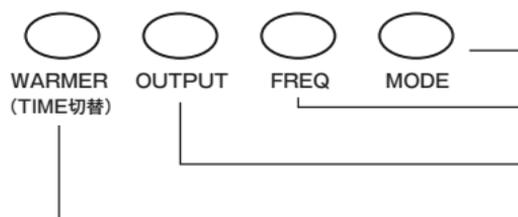

初期設定画面



TIME

【Time】タイマー表示

5分間：【5min】
4分間：【4min】
3分間：【3min】
2分間：【2min】
1分間：【1min】

OUTPUT

【Out】出力表示

SOFT:【S】
LOW :【L】
HIGH:【H】

FREQ

【Freq】周波数表示

1200Hz:【1200】
4800Hz:【4800】

MODE

【Mode】モード表示

MESSAGE
:【M】
TREATMENT
:【T】

※タッチスイッチの切り替えは、表記上の凹を押してください。

※Timeの切り替えは“WARMER”タッチスイッチを使用します。

※マスク通電中は、Timeの切り替えはできません。

※MODE切り替え時、MESSAGEは1200Hz、TREATMENTは4800Hzに自動で設定されます。

電源ランプ	電源ランプ表示		
	MODE	非通電時	通電時
	MESSAGE	点灯:グリーン	3秒間隔で点滅:グリーン
	TREATMENT	点灯:パープル	3秒間隔で点滅:パープル

パフ、マスクへの切換え方法

パフ→マスクへの切り替え：スキンマスク用コードをスキンコンディショナーに接続します。

マスク→パフへの切り替え：スキンマスク用コードをスキンコンディショナーから抜きます。ただし、マスク通電開始後はコードを抜いてから電源を入れ直します。

4 機能

①オートパワーオフ機能：5分

通電時間が合計で5分を経過すると自動的に電源が切れます。
※スキンマスクやリスト電極を離したり、化粧水等の水分が少なく電源ランプの点滅及びタイマーのカウントアップがされていない時は、使用時間としてカウントされません。

②セーフティパワーオフ機能：2分

電源が入った状態で2分間使用せず放置すると、自動的に電源が切れます。

③マスクオープンセンスアラーム：10秒

通電中に通電不良及びホック外れなどで通電しなくなった状態が10秒経過した場合に、音とディスプレイ表示でお知らせします。

アラーム…音1回、マスクのマークが点滅

[解除方法] スキンマスク、リスト電極を正しく装着 or 電源 OFF

④マスクコード抜けアラーム：10秒

通電中に本体からスキンマスク用コードが抜けた状態が10秒経過した場合に、音とディスプレイ表示でお知らせします。

アラーム…音2回、マスクのマークが点滅

[解除方法] スキンマスク用コードを本体に接続する or 電源 OFF

⑤マスク取り忘れお知らせ機能：3分

マスク通電終了後に3分間、マスクを着けたまま放置すると音でお知らせします。

5 使用後のお手入れと保管要領

- ・スキンマスクに残った化粧水・美容液は水道水等の流水で洗い流し、タオル等で軽く押さえながら水気を拭きとってください。マスク裏側の黒い電極部に電極保護シートをのせ、専用の収納ポーチに入れて保管してください。
- ・水洗いの際は、洗濯機を使用せず、流水で洗浄してください。
- ・月に1回程度、衣料用中性洗剤を希釈して浸け置き洗浄を行ってください。洗浄後はしっかりと流水ですすぎ、水を切って乾かしてください。
- ・内側のゴム電極を外して洗うことができます。
(別紙「スキンマスクのお手入れ手順」参照)
- ・本品は、環境条件により変色する場合があります。性能及び安全性には影響ありませんので、安心してご使用ください。

6

ご使用上の注意

⚠ 警告



修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火、異常動作、感電事故の元になることがあります。



- ・機器本体は、水につけたり、水をかけたりしないでください。異常動作・故障の原因となる恐れがあります。
- ・機器本体を浴室など湿気の多い場所で使わないでください。感電および故障の原因になります。

⚠ 注意




- ・傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ・色素異常など異常のある部位には使用しないでください。
- ・本器の使用中に頭痛を感じたり、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・スキンマスク用コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。コードが破損すると、異常動作の原因となる恐れがあります。

〈スキンマスク用コードを保管する場合〉



コードは図のように軽く束ねてください。

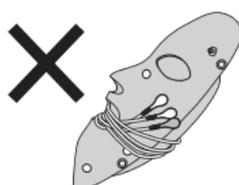

機器本体やスキンマスクに巻き付けしないでください。

7

アフターサービス

・「Moisteane IV 取扱説明書」P12を参照してください。

※修理を依頼される場合[発送先]は以下をお願いします。

株式会社ホームイオン研究所『西東京工場』

〒191-0024 東京都日野市万願寺4-22-8

TEL: 042-584-5132

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町17番2号

TEL:0120-4379-39

10:00~16:00 (土・日・祝日をのぞく)